

TIFFI

Eyewear

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU MEDYCZNEGO OPRAWA OKULAROWA DO SZKIEŁ KOREKCYJNYCH TIFFI EYEWEAR

OPIS

Oprawa okularowa do szkielek korekcyjnych TIFFI EYEWEAR składa się z tarczy, mostka, nanośnika oraz dwóch zauszników. Oprawa okularowa po zamontowaniu w niej soczewek korekcyjnych służy do korekcji wad refrakcji. Oprawy okularowe są integralną częścią okularów korekcyjnych. Okulary korekcyjne należy używać zgodnie z zaleceniami specjalisty (do dali, do blizy bądź do użytku stałego albo czasowego).

KONSERWACJA

Oprawy okularowe należy myć tak często, jak jest to konieczne – wodą lub przeznaczonym do tego preparatem. Oprawy okularowe oraz soczewki okularowe należy czyścić jedynie miękkimi chusteczkami z mikrofibry, przeznaczonymi do tego celu. Do czyszczenia opraw okularowych oraz soczewek nie używać silnych środków czyszczących lub chemicznych.

WSKAZANIA

Oprawa okularowa w połączeniu z soczewką korekcyjną służy do korekcji wad wzroku. Okulary korekcyjne są wykonane według indywidualnych parametrów użytkownika. Nie należy udostępniać ich innym osobom.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Oprawy okularowe mogą powodować ucisk bądź uwierać w nos, skronie lub uszy, powodując dyskomfort użytkownika. W celu uniknięcia powyższych dolegliwości, oprawy okularowe muszą być indywidualnie regulowane i dopasowane do twarzy użytkownika w zakładzie optycznym.

OSTRZEŻENIA

Przed rozpoczęciem użytkowania opraw okularowych należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia okularów nie należy naprawiać ich samodzielnie, lecz zgłosić się do zakładu optycznego w celu naprawy uszkodzeń, wymiany części opraw na nowe oraz ponownej regulacji i dopasowania opraw okularowych.

ZALECENIA SPECJALNE

Przed rozpoczęciem stosowania wyrobu medycznego – oprawy okularowej do szkielek korekcyjnych TIFFI EYEWEAR – należy skonsultować się ze specjalistą. Oprawa okularowa wraz z soczewkami korekcyjnymi przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku. Okulary korekcyjne należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Dla uniknięcia deformacji oprawy oraz powstawania naprężeń, oprawy okularowe należy zakładać i zdejmować oburącz. Chronić przed działaniem niskich i wysokich temperatur oraz przechowywać w futerałach.

DATA WYDANIA: 05.2021 II edycja

Producent:
Framed to Perfection Sp. z o.o. Sp. k.
04-480 Warszawa
ul. Antoniego Kacpury 45a

